

BACTICID AF

Preparat na bazie dwóch alkoholi do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych w placówkach służby zdrowia

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

- o preparat bez substancji sklasyfikowanych jako żrący i drażniący drogi oddechowe, nie zawiera aldehydów
- o wysoce bezpieczny dla personelu i pacjentów, możliwość użycia w pionie żywnościowym (podwójna rejestracja)
- o posiadający szerokie spektrum działania i bardzo krótki czas ekspozycji
- o nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach
- o łatwo dociera w trudnodostępne miejsca
- o wygodny w użyciu (butelka ze spryskiwaczem)
- o preparat przebadany zgodnie z normą 16615:2015

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE:

Spektrum	Czas działania
EN 13727, EN 14561 Bakteriobójczy (w tym MRSA, VRE)	30 sekund
EN 13624, EN 14562 Drożdżakobójczy	30 sekund
EN 13624 Grzybobójczy	2 minuty
EN 14348, EN 14563 Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy)	30 sekund
EN 14476 HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro	15 sekund
Adeno	30 sekund
Polio	2 minuty
EN 16615:2015 (bakteriobójcze i drożdżakobójcze)	1 minuta

SPOSÓB UŻYCIA:

Bacticid AF jest preparatem gotowym do użycia, nie należy go rozcieńczać. Powierzchnie równomiernie pokryć preparatem metodą natryskową lub za pomocą nasączonej ścierki i pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie spryskiwać preparatem z odległości około 30 cm.

PRODUKT ZAWIERA SUBSTANCJE CZYNNE:

Etanol 57g/100g, Propan-2-ol 6g/100g, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (substancje zwilżające)

KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:

Bacticid AF jest preparatem na bazie dwóch alkoholi i może być używany do wszystkich powierzchni odpornych na działanie alkoholi. Należy zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu środka do powierzchni z niektórymi tworzyw sztucznych, powłok z farb i lakierów. Na wypadek niepewności co do odporności danej powierzchni zaleca się indywidualną ocenę materiału przed użyciem preparatu, poprzez wykonanie miejscowej próby.

CERTYFIKATY I ATESTY:

Pozwolenie nr 7626/19 na obrót produktem biobójczym
Wyrób Medyczny kl.IIa
Znak CE 0088

KONFEKCYJONOWANIE:

Opakowanie	Pojemność	Karton
Kanister	5L	3x5L
Butelka	1L atomizer	8x1L
Butelka	1L	8x1L
Butelka	0,5L atomizer	
Butelka	0,25L atomizer	12x0,25L

Biachem Sp. z o.o.

ul. Alejkowa 21/B9
15-528 Sowlany
Tel/Fax: 085 661 21 21

Chemi-Pharm AS

Pollu 132
10917 Tallinn
ESTONIA